



## Agulha Hipodérmica Descartável Descarpack

### DESCRIÇÃO

As **Agulhas Hipodérmicas Descartáveis Descarpack** são estéreis, atóxicas e apirogênicas.

Disponíveis em diferentes tamanhos, possuem bisel trifacetado, sendo lubrificadas, o que facilita a punção, garantindo uma aplicação fácil e suave. Parede normal para o tamanho 13 x 0,45mm, extrafina para o tamanho 40 x 1,20 mm e parede fina para os demais tamanhos, possibilitando um aumento na taxa de fluxo com calibres menores.

As **Agulhas Hipodérmicas Descartáveis Descarpack** são aprovadas pelo INMETRO e apresentam canhão identificado por cores de acordo com a ISO 6009:1992 e permitem a conexão com seringas de bico luer slip e luer lock.

### PRODUTO



**Cadastro Anvisa:** 10330669063  
**Fabricante:** Jiangsu Jichun Medical Devices Co., Ltd.

## INDICAÇÃO DE USO

As **Agulhas Hipodérmicas Descartáveis Descarpack** foram desenvolvidas para aplicação de medicamentos e soluções em diferentes vias de administração: hipodérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa, e em diferentes formas farmacêuticas, podendo ser: veículos aquosos, veículos oleosos, pó em suspensão e pó para ressuspender/reconstituir.

## MODELOS DISPONÍVEIS

As **Agulhas Hipodérmicas Descartáveis Descarpack** são disponíveis nos tamanhos:

Gauge	Tamanho (mm)	Cor do Canhão
26G ½	13x0,45	Laranja
24G	20x0,55	Roxa
23G	25X0,60	Azul
22G1	25x0,70	Preta
21G1	25x0,80	Verde
22G1 ¼	30x0,70	Preto
21G1 ¼	30x0,80	Verde
18G1 ½	40x1,20	Rosa

## COMPOSIÇÃO

- **Cânula:** Aço Inoxidável;
- **Canhão:** Polipropileno;
- **Protetor:** Polipropileno;
- **Lubrificante:** Silicone Grau Médico;

## VALIDADE

05 (cinco) anos após data de fabricação.

## APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Tamanho	Código	Quant. Cartucho	Quant. Caixa Master
13 mm x 0,45 mm	0353101	100 unidades	100 cartuchos
20 mm x 0,55 mm	0353701	100 unidades	100 cartuchos
25 mm x 0,60 mm	0353801	100 unidades	100 cartuchos
25 mm x 0,70 mm	0353201	100 unidades	100 cartuchos
25mm x 0,80 mm	0353301	100 unidades	100 cartuchos
30 mm x 0,70 mm	0353401	100 unidades	100 cartuchos
30 mm x 0,80 mm	0353501	100 unidades	100 cartuchos
40 mm x 1,20 mm	0353601	100 unidades	100 cartuchos

## INSTRUÇÕES DE USO

1. Selecione o tipo de agulha a ser utilizada conforme seu calibre;
2. Abra o envelope na aba indicada expondo o canhão da agulha;
3. Conecte a seringa no canhão exposto com pressão e rosqueie no sentido horário;
4. Retire o protetor da agulha e ela estará pronta para o uso;
5. Após o uso, descarte o conjunto seringa-agulha em recipiente apropriado;

## ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

- Antes de utilizar leia atentamente as instruções de uso;
- Verificar cuidadosamente a integridade de cada embalagem primária antes do uso;
- Não utilizar caso a embalagem primária esteja violada;
- Produto esterilizado com Óxido de Etileno;
- Proibido reprocessar;
- Produto médico-hospitalar de uso único;
- Após o uso descartar em local apropriado;

## **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

---

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

Em atendimento ao Art.5º item V da IN 04/2012 esta Ficha Técnica pode ser solicitada através do e-mail:  
[descarpack@descarpack.com.br](mailto:descarpack@descarpack.com.br)